



Revision: V1.4
Effective: 2022.06
ENSMBPA2202307281YWW

Inden du bruger dette produkt, bedes du læse brugermanualen omhyggeligt og bruge det i overensstemmelse hermed. Gem venligst brugermanualen korrekt til vejledning når som helst. (Billederne i denne manual er kun vejledende)

Forord

Tak fordi du har valgt vores blodtryksmåler til armen. Inden du bruger denne blodtryksmåler til armen, bedes du læse brugermanualen omhyggeligt og bruge den i overensstemmelse hermed. Gem venligst brugermanualen korrekt til reference når som helst. Blodtryksmåleren til armen kan anvendes på hospitaler, i hjemmet, på skoler og i medicinske centre. Den er egnet til voksne, ikke til nyfødte. Produktets Korte Introduktion:

Den fulde betegnelse for dette produkt er blodtryksmåler til armen. Den består af hovedenheden og manchetten og er egnet til måling af blodtryk og puls hos mennesker. Blodtryksmåleren benytter sig af intelligent trykmåling, hvilket automatisk kan måle dit blodtryk til en passende værdi i overensstemmelse med dit eget blodtryk. Den kan effektivt reducere ubehaget forårsaget af forkert tryk, forkerte måletiden og samtidig forlænge levetiden for armen. Blodtryksmåleren har en stikkontakt til strømadapter og adapteren er valgfri, hvilket gør den nem at bruge. Denne blodtryksmåler har hukommelsesfunktion for 99 grupper af måledata fra to personer, som kan gemmes separat. Den kan vise den gennemsnitlige læsning af de seneste 3 grupper af måleresultater. Denne blodtryksmåler har funktionen til klassificering af blodtryk, hvilket er praktisk for dig til at vurdere, om dit blodtryk er normalt eller ej. Denne blodtryksmåler har en funktion til stemmeoplysninger (valgfri). Under måling og ved tilbagekaldelse af hukommelsen vil der være stemmevejledning.

Sikkerhed

Advarsler og grafiske symboler i brugermanualen har til formål at hjælpe brugere med at anvende produktet sikkert og korrekt, således at man undgår skader på brugere og andre. Specifikke betydninger er som følger:

	Type		Advarsel
	Se i manualen		Fabrikant
	Ikke fremstillet med naturlatex.		Batch nummer
IP21	Første karakteristiske tal 2: Mod indtrængning af faste fremmedlegemer: ≥12,5 mm i diameter. Andet karakteristiske tal 1: Mod indtrængning af vand med skadelige virkninger: lodret dryp.		

1

2. Isætning af batterier/Strømforsyning

Dette produkt kan både bruge batterier og med strømadapter.

2.1 Batterier

- Fjern batteridækslet i retning af pilen;
- Isæt fire AA-batterier;
- Luk batteridækslet.

Note

- Ikón Udskift batterierne
 - Venligst sluk maskinen ved batteriskift.
 - Hvis du fjerner batteriet i tændt tilstand, stoppes timeren.
 - Efter batteriskift kan det være nødvendigt at nulstille tiden. For yderligere detaljer, se afsnittet "3.2 Indstilling af Tid" eller "4.4 Indstilling af Tid".
 - Bortskaffelse af brugte batterier skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler om miljøbeskyttelse.
- Bemærk: Batteriets levetid og antal opladninger varierer afhængigt af brug og indstillinger.
- Batteriets levetid: Efter fuld opladning kan batteriet gennemføre mindst 180 målinger, og batteriet kan gennemføre mindst 300 opladnings- og afladningscykluser.

2.2 AC Strømforsyning (medfølger ikke)

- Forbind blodtryksmåleren med strømadapteren;
- Sørg for, at strømadapterstikket indsættes i højre side af blodtryksmålerens strømadapter-interface.
- Forbind strømadapteren til en stikkontakt, der passer til strømadapteren.

Note

- Når strømmen er slukket, afbryd strømstikket og adapteren, og afbryd derefter strømadapteren og blodtryksmåleren. Sørg for at bruge en dedikeret strømadapter.
- Når strømforsyningen og batteriet bruges samtidig, bruges der ikke batteristram.
- Når du skifter mellem strømadapter og batteri, skal du skifte i slukket tilstand, ellers vil apparatet slukke på grund af strømafbrydelse.
- Brug kun strømadapteren; hvis du trækker den ud af stikkontakten, vil den indstillede tid forsvinde. For at opretholde korrekt tidsvisning, brug batterier.

Note

- Når strømmen er slukket, afbryd strømstikket og afbryd derefter adapteren og blodtryksmåleren. Sørg for at bruge en dedikeret strømadapter.
- Når adapteren og batteriet bruges samtidig, bruges der ikke batteristram.
- Når du skifter mellem adapteren og batteri, skal du skifte i slukket tilstand.
- Brug kun strømadapteren; hvis du trækker den ud af stikkontakten, vil den indstillede tid forsvinde. For at opretholde korrekt visning af tiden, skal du bruge både batterier.

	Fabrikationsdato		Denne side op
	Model nummer		Unique enheds identifikation
	Serienummer		Holdbarhedsdato
	Medicinsk enhed		Se i manualen
	Hold tør		
	CE mærke		
	Bemyndiget repræsentant i Den Europæiske Union		
	Bortskaffes som elektronisk udstyr.		
	Grænse for fugtighed		Grænse for temperatur

	- For patienter med arytmier, diabetes, dårlig blodcirkulation eller tidligere slagtilfælde, bedes du bruge produktet under lægens vejledning. - Det kan være farligt for patienterne at foretage selvbedømmelse og selvbehandling baseret på måleresultaterne. Følg venligst lægens vejledning, da selvbedømmelse kan forværre patientens tilstand. - Der kan være risici såsom armløseleseshed eller smerte, der kan opstå på grund af overinflation af gasposen. - Undlad at placere manchetten over et sår, da dette kan forværre skaden. - Af hensyn til sikkerheden, opbevar venligst produktet et sted, hvor børn ikke nemt kan nå det. - Undgå at placere manchetten og påbegynde tryk på et lem, hvor der er indsat intravaskulær adgang, terapi eller en arterio-venøs (A-V) shunt, da dette midlertidigt kan forstyrre blodgennemstrømningen og skade patienten. - Vær opmærksom på, at trykpåvirkning af manchetten midlertidigt kan medføre tab af funktion for samtidig brugte blodtryksmonitører på samme lem. - Sørg for, at brugen af blodtryksmonitoren ikke medfører langvarig forringelse af patientens blodcirkulation. For lange kabler og slanger kan udgøre en risiko for børn og skal holdes uden for børns rækkevidde.
	- Spædbørn og børn, der ikke kan udtrykke deres tanker, bør ikke bruge produktet, da det kan forårsage ulykker eller tvister. - Brug det ikke til formål ud over blodtryksmåling. Dette kan føre til ulykker eller tvister. Brug venligst ikke kemiske midler som fortynder, alkohol eller benzin til rengøring af dette produkt. - Undgå at slå produktet kraftigt eller lade det falde fra en højde. - Sørg venligst for at bruge den specielle ammanchet til dette produkt, ellers kan målingen ikke være nøjagtig. - Brug ikke mobiltelefonen tæt på maskinen. Der er risiko for, at maskinen kan blive defekt.
	Undlad at adskille, reparere eller ombygge maskinen og ammanchetten til armtypen blodtryksmåleren, da dette ellers kan medføre ukorrekt måling.

2

3. Indstillinger

Dette apparat kan automatisk gemme 2x99 målinger i hukommelsen (2 brugere) og kan beregne gennemsnitsværdien af de seneste tre målinger. Det vil gemme korrekt bruger- og måletidspunkt, hvis de er indstillet korrekt, ellers kan bruger- og måletidspunktet ikke gemmes korrekt. Foretag venligst den indledende opsætning inden den første måling, hvis du ønsker at bruge hukommelses- og gennemsnitsværdifunktionen. Den indledende opsætning inkluderer indstillinger af bruger, tid, volumen og blodtryksenhed.

3.1 Indstilling

I slukket tilstand, hold MEMORY-tasten nede indtil brugersymbolet på skærmen begynder at blinke. Hold derefter MEMORY-tasten nede for at skifte mellem " " og " " for at vælge bruger, og tryk kortvarigt på MEMORY-tasten for at bekræfte og samtidig skifte til årsindstillingsmodus, medmindre du ønsker at vælge systemets standardbruger " ".

3.2 Indstilling af klokken

Vælg den bruger du ønsker at indstille tidspunktet på. Tryk på "MEMORY"-tasten i brugerindstillingsmode. Skærmen viser "2016" og blinker. Tryk og hold "MEMORY"-tasten nede, og værdien æges, og du kan skifte mellem årene 2016-2035. Når det ønskede år vises, skal du trykke kort på "MEMORY"-tasten for at bekræfte og samtidig skifte til "måned" og "dato" indstillingsmode. Månedensindstilling blinker nu, og tryk og hold "MEMORY"-tasten nede for at æge værdien. Du kan skifte mellem månederne 1-12. Når den ønskede måned vises, tryk kort på "MEMORY"-tasten for at bekræfte, og værdien for datoen blinker nu. Det er tid til at indstille datoen. Tryk og hold "MEMORY"-tasten nede for at æge værdien. Du kan skifte mellem datoerne 01-31. Tryk kort på "MEMORY"-tasten for at bekræfte, og samtidig skifter det til "time" og "minut" indstillingsmode. Værdien for timen blinker nu, og tryk og hold "MEMORY"-tasten nede for at æge værdien. Du kan skifte mellem timetallene 0-23. Når den ønskede time vises, tryk kort på "MEMORY"-tasten for at bekræfte, og værdien for minuttet blinker nu. Det er tid til at indstille minuttet. Tryk og hold "MEMORY"-tasten nede for at æge værdien. Du kan skifte mellem minuttallene 00-59. Når det ønskede minut vises, tryk kort på "MEMORY"-tasten for at bekræfte, og det skifter samtidig til "lyd" indstillingsmode, nemlig "SP" indstillingsmode.

	Hold MEMORY knappen nede for at vælge årstal.		Hold MEMORY knappen nede for at vælge måned.		Hold MEMORY knappen nede for at vælge timer.
	Tryk på MEROMY knappen for at bekræfte.		Tryk på MEROMY knappen for at bekræfte.		Tryk på MEROMY knappen for at bekræfte.
	Hold MEMORY knappen nede for at vælge timer.		Hold MEMORY knappen nede for at vælge minutter.		Hold MEMORY knappen nede for at bekræfte.
	Tryk på MEROMY knappen for at bekræfte.		Tryk på MEROMY knappen for at bekræfte.		Tryk på MEROMY knappen for at bekræfte.

7

	- Må ikke bøje tvinge en bejning af manchetten eller luftslangen. Ellers vil blodgennemstrømningen blive påvirket, og patienten kan blive skadet. - Når du fjerner luftslangen, skal du tage luftslangen ud foran. - Tryk ikke på produktet, inden ammanchetten er snoet omkring armen. - Da lækage af tørre batterier kan beskadige produktet, skal du være opmærksom på følgende punkter: - Hvis du ikke bruger produktet i lang tid (mere end 3 måneder), skal du tage batteriet ud. Efter brug skal du straks udskifte batteriet, der har strømmangel, med et nyt. Bland ikke gamle og nye batterier. - Installer batteriet korrekt med positiv og negativ pol. - Bland ikke forskellige typer batterier. - Ændr ikke dette udstyr uden tilladelse fra producenten. - Blodtryksmåleren må ikke serviceres eller vedligeholdes, mens den er i brug sammen med patienten.
	- Hvis du bruger en strømforsyning, så skal du være sikker på at den passer til måleren, ellers kan måleren blive beskadiget (kortslutning, brand med mere). - Vær venligst sikker på at bruge den passende vekselstrømsadapter. Brug strømstikket separat, ellers er der sandsynlighed for brand eller elektrisk stød
	Brug venligst ikke våde hænder til at trække stikket ud af vekselstrømsadapteren, da det ellers kan medføre elektrisk stød eller skade.

Introduktion

Monitoren kan bruges på hospitaler, i hjemmet, på skoler og i medicinske centre. Den er beregnet til voksne, ikke til nyfødte.

Brugergruppe

Alder: Voksen

Personer, der har brug for at få målt deres blodtryk.

1.2 Kontraindikationer

Alvorlig rytmeforstyrrelse

1.3 Enhedens dele

3

3.3 Indstilling af lyd (ikke versioner har denne funktion)

Efter at have indstillet tiden (3.2), skal du holde HUKOMMELSE-knappen nede, for at bekræfte og samtidig skifte til "SP"-tilstand, "ON" eller "OFF" blinker nu. Hold HUKOMMELSE-knappen nede for at vælge, når det er indstillet til "ON", er der en stemmevejledning, når blodtryksmåleren er i gang med målingen og viser hukommelsen; når det er indstillet til "OFF", er der ingen stemmevejledning. Efter at have valgt det, skal du trykke kort på HUKOMMELSE-knappen for at bekræfte og samtidig skifte til "Blodtryksenhed"-tilstand. Systemet indstiller som standard "ON", hvis du ikke har valgt noget.

	Hold "MEMORY" - knappen nede for at skiftekey for Tryk på "MEMORY" knappen for gemme indstillingen.	
--	---	--

Ikke alle modeller har denne stemme funktion.

3.4 Enhedsindstilling

Efter at have indstillet lyden, skal du trykke på HUKOMMELSE-knappen for at bekræfte og samtidig skifte til "Blodtryksenhed"-tilstand, "mmHg" eller "kPa" blinker nu. Systemet indstiller som standard mmHg som blodtryksenhed, hvis der ikke foretages noget skift. Efter at have valgt det, skal du trykke kort på HUKOMMELSE-knappen for at bekræfte, og det slukkes samtidig.

	Hold "MEMORY" - knappen nede for at skiftekey for Tryk på "MEMORY" knappen for gemme indstillingen.	
--	---	--


4. Anlæg manchetten

- Indsæt manchettens slang i luftslangens interface på blodtryksmåleren.
- Juster manchetten, indtil den er tilpas til at kunne placere din arm inden.
- Før armen gennem manchetten. Manchettens luftslange skal placeres ved håndfladens forkant.

8



Bagsiden

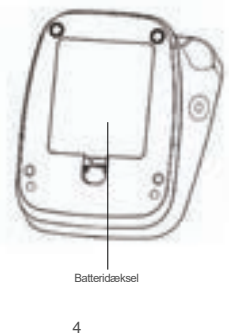

4

- Manchetten skal vikles om overarmen som vist på tegningen. Slangen skal pege nedad i retning af langebingeren.

- Kanten på manchetten skal være 2-3 centimeter fra albuen.

- Manchetten skal sidde tilpas stramt (man skal kunne prese 2 fingre ned imellem manchert og arm.

5. Måling af blodtryk

5.1 Korrekt måle metode

- Venstre arm, højre arm er begge acceptable til måling. Brug bare arme eller kun tynde tøj til måling. Mål venligst i et rum med en passende temperatur. Udfør målingen komfortabelt og naturligt, med fødderne fladt på gulvet og benene ikke krydset.
- Støt albuen på et bord;
 - Manchetten skal være på højde med dit hjerte.
 - Håndfladen skal være opad



9

5

6

Tekniske informationer af akademisk karakter på engelsk, da de ikke vedrører brugen af apparatet

1	Tekniske oplysninger af akademisk karakter på engelsk	
2	The Arm type Blod Pressure Monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of Arm type Blood Pressure Monitor should assure that it is used in such an environment.	
3	Emissions test	Compliance
4	RF emissions CISPR 11	Group 1
5	RF emissions CISPR 11	Class B
6	Harmonic emissions IEC 61000-3-2	N/A
7	Voltage fluctuations / flicker emissions IEC 61000-3-3	N/A

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity – for all EQUIPMENT and SYSTEMS		
Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity		
Therm type blood pressure monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of therm type blood pressure monitor should assure that it is used in such an environment.		
Immunity test	EN 60601 test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 15 kV air	± 8 kV contact ± 15kV air
Electrostatic transient / burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	± 2 kV for power supply lines
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV differential mode ± 2 kV common mode	±1kV differential mode
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines	< 5 % UT (>95 % dip in UT) for 0.5 cycle	< 5 % UT (>95 % dip in UT) for 0.5 cycle
IEC 61000-4-11	40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles	40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles
	70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles	70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles
	< 5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 ssec	< 5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 ssec
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m	30A/m
NOTE	UT is the a. c. mains voltage prior to application of the test level.	

- Tryk ikke på luftslangen, da dette kan begrænse luftstrømmen til manchetten.
- Sid stille under måling og undlad at tale under målingen.
- Manchettens placering kan påvirke måleresultaterne.
- Bær ikke maskinen, manchetten og luftslangen under målingen.
- Du bør være stille, når målingen starter, og kroppen skal være i en afslappet tilstand.
- Vær venlig at være stille i 4-5 minutter inden målingen.
- Slap af i kroppen, undgå muskelaktivitet.
- Tal ikke eller bevæg dig, mens du bliver målt.
- Vent 2-3 minutter, hvis du ønsker at måle igen.
- Brug ikke mobiltelefoner og andre mobile enheder i nærheden af maskinen.

5.2 Fremgangsmåde for blodtryksmåling

Maskinen har 2 typer blodtryks enheder, nemlig mmHg og kPa. Henvis venligst til afsnittet for den specifikke metode til indstilling.

Tag mmHg-værdien som et eksempel i den følgende forklaring.

1)Tryk på "START / STOP"-tasten, maskinen vil automatisk nulstille, og manchetten vil begynde at fyldes med luft. Pumpen starter med at puste manchetten op, og skærmen viser trykændringer i manchetten. I processen med at puste manchetten op, registrerer Blodtryks-måleren også pulsen. Under hele måleprocessen, må du ikke flytte armen.

2) Når luften i manchetten når en stabil tryktilstand, stopper pumpen med at puste luft ind. Trykket i manchetten vil gradvist falde, og samtidig vil det blive vist på skærmen, og hjerterikonet vil blinke.

3) Efter målingen vil maskinen samtidig udligne lufttrykket og vise din blodtryksværdier samt pulsantalt.

Bemærk: Maskinen vil automatisk gemme blodtryksværdierne og pulsfrekvensen.

Afbrydelse af måling:

Hvis du er i en eller anden grund skal afbryde målingen (f.eks. hvis du føler dig utilpas), kan du til enhver tid trykke på "START / STOP"-tasten. Maskinen vil automatisk reducere trykket i manchetten og afbryde målingen.

Vigtigt note :

For den samme bruger bør der være mindst 2-3 minutters mellemrum mellem de to målinger. Ventetiden mellem de to målinger er primært for at lade arterien vende tilbage til tilstanden før blodtryksmålingen.

Tekniske oplysninger fra producenten (på engelsk).

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

Therm type blood pressure monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of therm type blood pressure monitor should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	EN 60601 test level	Compliance level
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 V 0, 15 MHz -80 MHz 6 V in ISM and amateur radio bands between 0, 15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz	3 V 0, 15 MHz -80 MHz 6 V in ISM and amateur radio bands between 0, 15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz
Radiated RF EM fields IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz -2,7 GHz 80 % AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz -2,7 GHz 80 % AM at 1 kHz

Table 9 - Test specifications for enclosure port immunity to RF wireless communications equipment

Test frequency (MHz)	Band ^{a)} (MHz)	Service ^{a)}	Modulation ^{b)}	Maximum power (W)	Distance (m)	Immunity TEST LEVEL (V/m)
385	380 -390	TETRA 400	Pulse modulation ^{b)} 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM(c) ± 5 kHz deviation	2	0,3	28
710	704 - 787	LTE Band 13, 17	Pulse modulation ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810						
870	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, DEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation ^{b)} 18 Hz	2	0,3	28
930						
1 720						
1 845	1 700-1 990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3 & 25; UMTS	Pulse modulation ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28
1 970						
2 450	2 400-9 570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28
5 240	5 100-5 800	WLAN 802.11 a/n	Pulse modulation ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9
5 500						
5 785						

NOTE:

If necessary to achieve the immunity test level, the distance between the transmitting antenna and the me equipment or me system may be reduced to 1 m. The 1 m test distance is permitted by IEC 61000-4-3.

a) For some services, only the uplink frequencies are included.

b) The carrier shall be modulated using a 50 % duty cycle square wave signal.

c) As an alternative to FM modulation, 50 % pulse modulation at 18 Hz may be used because while it does not represent actual modulation, it would be worst case.

In the measurement process, if the body is moving, it will cause the measurement result is not accurate, or measure the failure, and it will display error message. In this case, please repeat the measurement process, and keep quiet until the end of the measurement.

If Irregular Heartbeat(HB) brought by common arrhythmias is detected in the procedure of blood pressure measurement, a signal of  will be displayed.Under this condition, the blood pressure monitor can keep function,but the results may not be accurate.It's suggested that you consult with your physician for accurate assessment.

5.3 Answers to the question during measurement

Hændelser	Årsag	Løsning
Unormal måling (høj eller lav)	Manchetten sidder ikke korrekt Såd ikke stille eller talte under måling Når ærmet er smæget op	Sæt manchetten som beskrevet i manualen (part 5) Sid helt stille under målingen Mål direkte på huden, eller på et enkelt tag stof.
Flad manchet	Tjek om manchetten er udtæt Er manchetten forbundet	Udskift manchetten med en ny Forbind manchetten korrekt
Løs manchet	Tjek om manchetten sidder ok	Manchetten skal sidde tilpas stramt

6. Hukommelse

6.1 Visning af data:

Denne blodtryksmåler gemmer 2x99 sæt hukommelsesværdier, hvor hver måling automatisk gemmes. Når der er gemt 2x99 sæt hukommelsesværdier, vil de ældre værdier blive overskrevet af de nye.
Du kan vise gennemsnitsværdien af de seneste 3 målinger.

Note

●For at foretage en korrekt måleønete skal du inden målingen sørge for at indstille den korrekte bruger og tid. Under én bruger er der gemt 99 sæt data, når du gemmer den 100. sæt dato, vil den tidligste dato blive slettet.

6.1.1 Læs data i hukommelsen

Ved kort tryk på MEMORY-knappen visen den seneste gennemsnitsværdi af de seneste 3 målinger. Der vil stå "AVG" i øverste højre hjørne.

●Når antallet af hukommelsesværdier er mindre end 3 sæt, f.eks. hvis der er 2 sæt hukommelsesværdier, vil hukommelsesknappen vise gennemsnitsværdien for disse 2 sæt. Hvis der kun er 1 sæt hukommelsesværdi, vil hukommelsesknappen vise denne ene måleværdi.

Forholdsregler

Ifølge IEC60601-1-2:2014 overholder blodtryksmåleren alle relevante krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Den kan forårsage skadelig interferens med andre enheder, hvis du ikke følger instruktionerne. Dog er det ikke sikkert, at den ikke forårsager interferens med andre enheder, selv hvis du følger instruktionerne. Hvis den forårsager interferens med andre enheder, kan du afhjælp interferensen ved at følge følgende metoder:

Øg afstanden mellem denne enhed og andre enheder.

Tilslut de to enheder til forskellige strømkæder. Væsentlig dyeevne og grundlæggende sikkerhedstest bør udføres hvert andet år. Hvis din enhed skal testes, bedes du kontakte din leverandør eller Yongkang. Denne enhed kan kun testes af en leverandør, der er autoriseret til det.

Navn	Blodtryksmåler til overarm	
Model	IMBPA2	
Display	LCD Display	
Tæthed	IP21 beskriver beskyttelsesgraden for en enhed mod indtrængen af faste fremmedlegemer og vand. Her er en beskrivelse af de to karakteristiske tal: Første karakteristiske tal 2: Beskyttelse mod indtrængen af faste fremmedlegemer: ≥12,5 mm diameter Andet karakteristiske tal 1: Beskyttelse mod indtrængen af vand, der kan være skadeligt	
Måling	Overarm	
Måleområder	NIBP Statisk trykmåleområde: 0-280 mmHg Dynamisk trykmåleområde: Systolisk blodtryk: 40-250 mmHg Diastolisk blodtryk: 30-200 mmHg	
Nøjagtighed	Puls 40-199 bpm NIBP ≤±3mm Hg(±0.4kPa) PR ±5%	
Batterier	4 AA alkaline batteries, DC5V	
Spænding	Volt 5V Lave parametre 4.4V±0.2V nedre grænse Auto sluk Slukker automatisk efter 2 minutters stilstand	
Mål	130,9*96,1*63.1mm	
Netto vægt	237g	
Arbejdsområde	Temperatur	+5°C～40 °C
	Fugtighed	15%RH～85%RH
	Atmosfærisk tryk	86kPa～105kPa
Transporting and storing Condition	Temperature	-20°C～+55°C
	Humidity	10%RH～95%RH
Sikkerhed	Atmospheric	50kPa～105kPa
	Intern strømforsyning (Når der bruges en adapter, hører den til klasse II). Intern strømforsyning), udstyr af BF-type anvendelse.	
Forventet holdbarhed	5 år ved normal behandling	

6.1.2 Read the result

Press the MEMORY key in average mode, you can read the latest 1 time measurement value,repeat press the MEMORY key to cyclic switch in the previous measurements.

6.2 Delete the memory value

Long press the MEMORY key in the memory mode,all memory values will be deleted.

Advarsel

●Alle data i hukommelsen slettes når data indstilles.

7.Vedligeholdelse

Følg altid manualens instruktioner, i modsat fald bortfalder fabriksgarantien.

7.1 Rengøringshyppighed

Hvis apparatet er smusvet, anbefales det at rengøre det. Se afsnit 8.2 for rengøringsmetoden. Hvis apparatet ikke er smusvet, kan man blot rengøre manchetten før og efter hver brug. Det anbefales at lægge et engangsklud under manchetten for at reducere risikoen for krydstamningering. Se afsnit 8.2 for den specifikke rengøringsmetode

7.2 Rengøringsmetode

Rengør blodtryksmåleren med en blød tør klud. Hvis den er meget smusvet, kan du fugte kluden med vand eller et neutralt rengøringsmiddel, vride den op og tør blodtryksmåleren af. Glat manchetten ud, tør den af med 75% alkohol og lad den tørre. Når den bruges på hospital, efter brug, skal apparatet og manchetten afføres med 75% alkohol, tørres og derefter desinficeres med ultraviolet stråling.

Note

Der må ikke trænge vand/fugt ind i blodtrykmåleren, eller i manchetten.

Note

Rengør ikke apparatet og manchetten med naphtha, fortynder eller benzin osv. Gør ikke manchetten våd eller forsøg at rengøre den med vand.

7.3 Opbevaring

Må ikke opbevares på følgende måder:

I hvor der er risiko for store mængder af partikler i luften.

I direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv, områder med korrosive gasser.

Steder med hældning, vibrationer eller stød.

Steder der opbevarer kemikalier eller korrosive gasser.

7.4 Noter

●Hvis blodtryksmåleren ikke performer som anført i beskrivelsen eller ændrer sig, skal du stoppe med at bruge det med det samme og kontakte forhandleren.

- Brug ikke dette produkt, hvis du er allergisk over for ABS og andre materialer.
- Undgå direkte brug i miljøer med elektromagnetisk interferens for at forhindre midlertidig påvirkning af nøjagtigheden.
- Produktet er egnet til professionel brug eller brug derhjemme.

● Den korrekte anvendelsesmetode er afgørende for målepræcisionen. Operatører bør have visse kendskab til blodtryk. Driftsmiljøet skal være i overensstemmelse med manualen. For hyppige målinger kan medføre skade på patienten på grund af forstyrrelser i blodgennemstrømningen

●Slidt udstyr påvirker målingerne

●Venligst placer blodtryksmåleren et sted, hvor barn, kæledyr osv. ikke kan røre ved den.

- Brug ikke produktet ud over dets levetid, ellers vil instrumentets nøjagtighed blive påvirket.
- Blodtryksmåleren kan ikke serviceres og vedligeholdes under brug.

Blodtryksmåleren bør ikke opbevares steder med dårlig ventilation og højt indhold af støv og frug. Undgå direkte sollys og kraftige lyskilder.

7.5 Bortskaffelse

1.Følg de gældende lokale regler for bortskaffelse af elektronisk udstyr.

8.0 Fabrikkens deklarerationer

- Brug af blodtryksmåleren et elektromagnetiske miljø, kan det medføre unormal drift af produktet.
- Den interne struktur af lodtryksmåleren inkluderer magnetske ringe, magnetske perler og ledende stof til påsprøjtning af ledende maling for at undgå elektromagnetisk interferens, således at der ikke opstår uønskede begivenheder for patienter og operatører på grund af elektromagnetisk interferens.
- Advarsel: Brug af denne blodtryksmåler ved siden af eller stablet sammen med andet udstyr bør undgås, da det kan medføre ukorrekte observationer, der skal bekræfte, at de fungerer normalt.
- Advarsel: Brug af tilbehør, transducere og kabler, der ikke er specificeret eller leveret af producenten af dette udstyr, kan medføre øget elektromagnetisk udstråling eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr og resultere i ukorrekt drift.
- Advarsel: Bærbar RF-kommunikationsudstyr (inklusive tilbehør som antennekabler) skal bruges ikke tættere end 30 cm (12 tommes) til nogen del af armtypen blodtryksmåleren, inklusive kabler specificeret af producenten. Ellers kan det medføre forringelse af dyeevnen for denne armtypen blodtryksmåler.

og eksterne antenner) skal ikke bruges tættere end 30 cm (12 tommes) til nogen del af blodtryksmåleren, inklusive kabler specificeret af producenten. Ellers kan det medføre forringelse af dyeevnen for denne armtypen blodtryksmåler.

II . Klassifikation af blodtryk

LCD	Højt blodtryk	Lavt blodtryk
Alvorligt	≥ 180	≥ 110
Meget højt	160～179	100～109
Moderat højt	140～159	90～99
Lettere højt	130～139	85～89
Normalt	120～129	80～84
Ønskeligt	≤ 119	≤ 79

III . LCD Fejl meddelelse

LCD Fejlbesked	årsag
"ER2"	1. Sørg for, at luften inde i manchetten er blevet tømt. 2. Klem ikke manchetten, efter målingen er begyndt. 3. Bevæg ikke din arm under målingen.
"ER3"	Målingen er unormal
"ER4"	Manchetten er for løs
"ER5"	Slangen er blokeret
"ER6"	For meget interferens under målingen.
"ER7"	Trykket er over grænsen.

Garanti

- Der er to års gratis garanti efter sælget.
- Garantien bortfalder under følgende forhold:
- Fejlen forårsaget af at adskille og ændre produktet.
- Produktets indre fejl forårsaget af tab ved opsamlng eller brug.
- Fejlen forårsaget af forkert brug eller manglende rimelig pleje.
- Fejlen forårsaget af ikke at følge betjeningsvejledningen.
- Fejlen forårsaget af naturkatastrofer, såsom oversvømmelse, brand.
- Fejlen forårsaget af forkert reparation af en reparationsbutik, der ikke er vores autoriserede.
- Venligst vis dit gyldige garantibevis og indbøkskvitteringer, når du har brug for gratis service.
- Venligst bring produktet til en autoriseret reparationsbutik, når du har brug for gratis reparation.
- Ved udførelse af garantitjeneste kan du, hvis det er nødvendigt, give oplysninger om produktkomponenter, kredsløbsdiagrammer og identifikation af reparationer, som vores kvalificerede tekniske personale kan identificere.
- Vi vil opkræve en rimelig afgift, når vi reparerer visse fejl, der falder uden for garantitjenesten.