

SARS-CoV-2 Antistof Test (colloidal gold immunochromatography)

【Produkt navn】

SARS-CoV-2 Antistof test
(colloidal gold immunochromatography)

【Model】

20 engangs test kits

【Anvendelse】

Produktet er beregnet til kvalitativ påvisning af antistofindhold af SARS-CoV-2 i kliniske prøver (serum / plasma / blod).

【Opbevaring】

Skal opbevares ved temperaturer i mellem 4°C og 30°C (grader Celsius), tørt og ikke i direkte sollys. Holdbarheden er 12 måneder fra fabriksdatoen (Fremgår af pakningen).

【Prøvetagning / forbehold】

Blodprøven skal tages af en læge eller af uddannet sundhedspersonale.

Prøven skal anvendes med det samme, eller opbevares ved temperaturer imellem 2 og 8 grader celsius (maksimalt i 36 imer).

Nedkølede prøver skal tempereres før afprøvning (stuetemperatur).

Brug ikke prøver med svær hæmolyse, svære lipider og gulsot.

【Selve testen】

Læs instruktionen før testning, og sørg for at have rene hænder, og en håndsprit nær dig


1. Pak test kassetten ud af den forseglede pakning. Skal anvendes inden 1 time efter at pakningen er blevet brudt.
2. Placer kassette på en vandret overflade/bord

Tag en fingerprikker og prik i spidsen af en finger ved siden af fingerblommen. Masser din finger således, at en tydelig bloddråbe dannes, uden at berøre blodråben.

Tag pipetten og sug en blodprøve op i røret.

2 dråber af blod (ca.20 uL) fra pipetten skal i dryppes i brønd A.


Herefter dryppes 2 dråber af saltvandsopløsning i brønd B (cirka 80 uL), og start tidtagning.

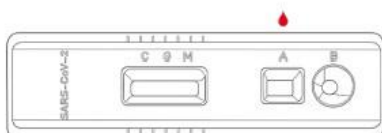

3. Efter ca. 15 minutter skal resultatet aflæses (der må ikke gå længere tid før aflæsning!). Hvis der går længere tid, skal en ny test foretages.

【Aflæsning af resultaterne】

- Positiv (+): Kontrolstreg (C) og en eller flere streger M og eller G.
 - Negativ (-): Kun en kontrolstreg (C).
 - Invalid: Ingen kontrolstreg (C) – ny test
4. C = Kontrolstreg
 5. G = IgG positiv
 6. M = IgM positiv

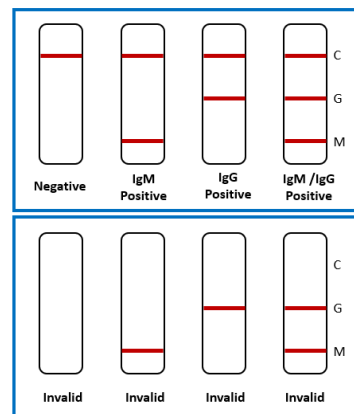

C: Quality Control Line M: IgM Detection line G: IgG Detection line

Et komplet sæt indeholder:
20 x foliepakninger påtrykt SARS_CoV-2 antistof test.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.
20 x Engangs fingerprykkere
20 x Pipetter
1 x Saltvandsflaske

Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. Address: 3th Floor and 5th Floor Building 7-1 No.37
Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200,
P.R. China Tel: +86-10-80123100
[Email: international@lepumedical.com](mailto:international@lepumedical.com)
www.en.lepumedical.com

Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A. Abe Lenstrat
Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen, The Netherlands
Tel: +31-515-573399 Fax: +31-515-760020



Approval Date and Revision Date of the Instruction: Approved on Feb. 07, 2020; Revised on Apr.3,2020 Version number: In CG25 REV.02

