

Øre termometer

(Infrarød måling)

Brugsvejledning

Intermedico  0197

Vi anbefaler, at du læser hele manualen før apparatet tages i brug.

Dette termometer er udviklet med henblik på at give nøjagtige, sikre og hurtige temperaturmålinger i øret. Det er vigtigt at termometret anvendes korrekt, for at opnå de mest nøjagtige resultater.

Specifikationer:

Dette produkt fremstilles i henhold til EN12470-5:2003 (kliniske termometre -- Del 5: Krav til infrarøde øretermometre).

Dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder: IEC 60601-1, IEC 60601-1-11 and IEC 60601-1-2.

Temperaturområde: 34.0°C~44.0°C (93.2°F~111.2°F)
 Symbol L°C(L°F) Når målingen er under 34.0 °C(93.2°F)
 Symbol H°C(H°F) Når målingen er over 44.0°C(111.2°F)


Arbejdsområde (rum temperatur):
 Temperatur: 16 °C~35°C (60.8°F~95.0°F)
 Fugt: ≤80%RH

Opbevaring:
 Temperatur: -25 °C to 55°C (-13°F to 131°F)
 Fugt: ≤85%RH


Display opløsning: 0.1°C(0.1°F)

Præcision: ±0.2°C (fra 35.5°C til 42.0°C)
 ±0.4°F (fra 95.9°F til 107.6°F)

Display: flydende krystaller, 3 1/2 tegn.

temperatur værdi: Viser den højeste værdi målt under målingen.
 temperatur enheder: Celcius eller fahrenheit
 Hukommelsen: De seneste 10 målinger
 Batteri indikator: 

Strømforbrug: 0,6 millionwatt ved målinger
 Batteri: 2 stk. 1.5V alkaline batterier (AAA)
 Batterilevetid: Op til 4000 målinger (max 2 år)
 Dimensioner: 134mm x 70mm x 34mm
 Vægt: Cirka 74g
 Beeper lyd: Ved tænd/sluk, tilendebragt måling og ved lavt batterikapacitet.

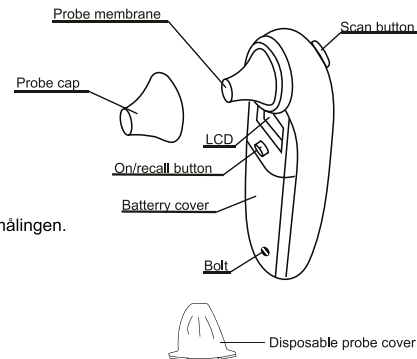

Forholdsregler


1. Termometret skal have samme temperatur som rumtemperaturen i rummet der måles i.
2. Brug kun nye originale prober ved målinger.
3. Øret skal holdes fri for tilstopning og for ophobning af ørevoks.
4. Symbolet ' ? ' på skærmen viser at du kan foretage målinger i øret.
5. Undgå ridser på probe membranen
6. Hvis der LCD skærmen er blank, prøv at fjerne og indsætte batterierne.
7. Brug ikke termometret hvis øregangen er irriteret.



Batterier og termometre skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning


Noter:

- Brug altid nye og rene prober
- Proberne skal monteres korrekt (incorrect = forkert, correct = korrekt)

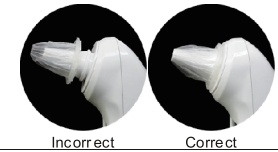


Måling af temperaturen i ørekanalen.

1. Tryk på 'on/recall' knappen for at tænde termometret. Efter "beep" vises Fig. A i displayet, i ca. 1 sekund. Når Fig. B vises er termometret klar til brug.

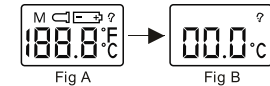

2. Træk øreflippen lidt tilbage og lidt opad for at sikre en fri adgang til trommehinden.


- Børn under 1 år: Træk øreflippen lidt tilbage
 - Fra 1 år og ældre: Træk lidt tilbage og lidt opad.
- Nogle læger anbefaler ikke brugen af øretermometre til børn under 6 mdr.

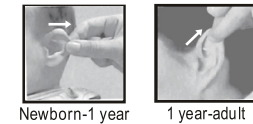


3. Placer sensoren i øregangen og tryk på "scan" knappen. Når du slipper knappen kommer der en beep lyd, og målingen er færdig. Aflæs resultatet på skærmen.

4. Gentag måling: Tryk på "scan" knappen, og øresymbolet vises på skærmen. Gentag målingen (pkt.3) - OBS der skal gå mindst 1 minut imellem hver måling.

5. Hukommelsen: Tryk på 'on/recall' knappen, og du kan se de seneste målinger (Fig C & Fig D).

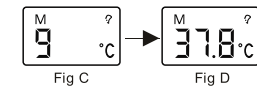

6. LCD skærmviser: 'Er 1' (som Fig E) indikerer at rumtemperaturen ikke er i området 10 C til 35 C.

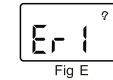

7. Slukning: Termometret slukker automatisk efter ca. 1 minut.

Du kan skifte imellem celcius visning. Tænd for enheden og hold "on/recall" knappen nede i 3 sekunder. Fig F viser herefter om termometret måler i celsius eller i fahrenheit.



Bortskaffelse

Termometret og batterierne skal bortskaffes i henholdende til gældende lovgivning.




Rengøring og opbevaring.

1. Termometret og prober skal opbevares støvfrit, og ved temperaturer imellem -25C og 55C.
2. Rengøres bedst med en fugtet klud med alkohol (70% Isopropy) Brug ikke andre former for rengøringsmidler.



Udskiftning af batterier

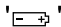1. Batterierne skal udskiftes når dette symbol vises 
2. To stk 1.5V ALKALESCENCE BATTERIES (AAA)
3. Batterilåget er sikret med en skrue.(bolt på tegningen).
4. Fjern de gamle batterier
5. Indsæt de nye batterier - vær opmærksom på + og -
6. Vær opmærksom på at batterier kan lække hvis termometret ikke bliver brugt over en længere periode.

Intermedico ApS
 Viadukt alle 16 - 2900 Hellerup - Danmark
 info@intermedico.dk