

# ACE AFM-5 Breathalyzer\*

## Quick Start Guide – DA

**ACE**  
Instruments  
PRECISION OR NOTHING.



1. Mundstykke og Mundstykkestuds
2. Tændknappen (på bagsiden af enheden)
3. Luftudløb (hold altid denne del ublokeret)
4. Batterikammerdækslet (på bagsiden af enheden)

### Selve målingen.

1. Kontrollér batterierne og indsæt et mundstykke i mundstykkestuds.
2. Download ALCOFIND-appen fra App Store (iOS) eller Google Play Butik (Android), åbn den og vælg sprog og måleenhed (per mill = EU, %BAC = USA, mg/L = UK).
3. Tryk på OK-knappen i appen og kontroller, om Bluetooth er tændt på din smartphone.
4. Tryk og hold Strømknappen på alkometret, indtil de blå, grønne og røde LED'er vises.
5. Paringsprocessen starter, og den blå LED vil blinke.  
BEMÆRK: Ved første paringsproces vises en anmodning om PIN-kode. Indtast "000000" som PIN-kode.

6. Hvis paringen lykkes, vises de grønne og røde LED'er på enheden, og skærmen på din smartphone vil vise "START TEST".
7. Tryk på "START TEST" på din smartphone (eller tryk på tænd knapped på bagsiden)
8. Vælg en bruger (i appen).
9. Den cirkulære stang på appen angiver opvarmningen. Når opvarmningsindikatoren når 95, tag en dyb indånding og gør dig klar til at puste.
10. Når "Start blæsning" vises, pust i 5 sekunder gennem mundstykket, indtil indikatoren når 100 (pust jævnt og som om du fløjtede uden pauser).
11. Hvis der tages en tilstrækkelig åndeindrætsprøve korrekt, vises "Analyserer data" i appen.
12. Efter nogle få sekunder vises den estimerede blodalkoholkoncentration på appen f.eks. i promille (3 cifre, 2 decimaler / promille = indstilling for EU-kunder).
13. Tryk enten på "Ny test" eller "BAC-niveau" i appen (eller tryk på startppen på ACE Instruments AFM-5) for at teste igen.

### Please note

- Vent i mindst 15 minutter efter den seneste indtagelse af alkohol. Restalkohol i mundhulen kan påvirke målingerne.
- Brug rene mundstykker til hver test.
- Standardindstillinger for EU er promille.
- Alle målinger er vejledende! og har ingen juridisk bindende virkning.

### \*Import & Distribution

ACE Handels- & Entwicklungslungs GmbH (ACE Instruments)  
Sägewerkstraße 9, 83395 Freilassing, Deutschland / Germany  
**Manufacturer**  
DA Tech Co., Ltd, 39, Pyeongcheon-ro, 141 Beon-gil,  
Bupyeong-gu, Incheon, Korea (Zip: 21310)